



# Getinge HS33

Krankenhaus-Dampfsterilisatoren



# Bewährte Krankenhaussterilisatoren

Überragende Geschwindigkeit,  
Kapazität und Effizienz

Für eine effiziente Sterilisation bei geringem Platzbedarf ist der Getinge HS33 Dampfsterilisator die optimale Wahl.

Kurze Zykluszeiten und effiziente Prozesse sorgen für eine konstante Versorgung mit sterilen Gütern, wann immer Sie diese benötigen. Getinge HS33-Sterilisatoren bieten die effiziente Leistung und den überragenden Durchsatz, den Sie von Getinge immer erwarten können.

Sie erkennen sie an hellen und übersichtlichen Touchscreen-Bedienfeldern, die auch aus einiger Entfernung gut ablesbar sind. Ein durchdachtes und benutzerfreundliches Design unterstützt eine einfache Bedienung und eine zuverlässige Prozessdokumentation.

# Einzigartige Konstruktion

## Schnelle Sterilisation

Die einzigartige Konstruktion des Getinge HS33 unterstützt einen der schnellsten Sterilisationszyklen auf dem Markt. In Kombination mit der hohen Beladepazität sorgt Getinge HS33 für eine höhere Produktionseffizienz.

### Einzigartige kostensparende Konstruktion

- Die Heizelemente kommen zu keiner Zeit mit Wasser in Berührung, wodurch sie eine sehr lange Lebensdauer haben.
- Die Gesamtleistungsaufnahme beträgt weniger als 6 kW (Dampferzeuger 3,6 kW). In den meisten Fällen kann der Getinge HS33 direkt an die vorhandene Elektroinstallation angeschlossen werden.
- Die einzigartige Konstruktion ermöglicht sehr kurze Zykluszeiten.
- Kein unter Druck stehender Dampferzeuger im Standby-Modus.

### Zwei Kammergrößen für diverse Anforderungen

Getinge HS33 ist in 60- und 100-Liter-Versionen mit manuell bedienbarer oder automatischer Tür erhältlich.

### Intuitive Benutzeroberfläche

Getinge HS33 ist mit benutzerfreundlichen Touchscreens mit hoher Auflösung ausgestattet. Die Bildschirme bieten kurze und intuitive Anweisungen mit einer klaren Übersicht, die aus verschiedenen Blickwinkeln im Kontrollbereich gut zu erkennen ist. Der Sterilisator ist sehr einfach zu bedienen – schließen Sie einfach die Tür und drücken Sie die Starttaste.

### Echtzeit-Zyklusdaten erfassen und speichern

Getinge HS33 Sterilisatoren lassen sich in T-DOC, unsere Sterilgutmanagementlösung, integrieren, indem sie Zyklusdaten in Echtzeit erfassen und speichern. Dies ist eine wertvolle Informationsquelle für AEMP-Führungskräfte und Krankenhausadministratoren, um Probleme schnell zu beheben, die Produktionsplanung zu verbessern und die Konformität zu überprüfen.



### **Minimierter Wartungsaufwand**

Der Sterilisator verfügt über wenige Komponenten, um die Wartung zu optimieren. Leistung und Effizienz werden mit der integrierten Getinge-Software überwacht. Anschlüsse für externe, unabhängige Temperatur- und Druckfühler zur Validierung sowie PC-Anschlüsse sind Bestandteile des Systems.

### **Optionaler Luftkompressor**

Wenn Sie nicht über eine Druckluftversorgung verfügen, bieten wir einen optionalen integrierten geräuscharmen, ölfreien Druckluftkompressor an.

### **ECO-System zur Reduzierung des Wasserverbrauchs**

Der Sterilisator ist standardmäßig mit einem Sparsystem zur Reduzierung des Wasserverbrauchs ausgestattet. Der gesamte Wasserverbrauch beträgt bei einem Standardprozess zirka 60 Liter.



# Beladeausrüstung

Wir bieten ein breites Spektrum an Beladeausrüstung – für eine einfache Handhabung und gute Arbeitsbedingungen.



Transportwagen zum Ein- und Ausfahren der Ladung in den/aus dem Sterilisator.



Edelstahlgestell mit Rollen für 18 Dentalkassetten. Das Gestell bietet eine Kapazität von bis zu 36 T rays pro Stunde.\*



Dreistufiges Edelstahlgestell mit Rollen. Erhältlich in zwei Größen für HS33-60L und HS33-100L.\*



Festes Aluminiumgestell mit drei Ebenen. Erhältlich in zwei Größen für den HS33-60L und HS33-100L.



Korb zur Verwendung zusammen mit dem Tray mit Rollen. Erhältlich in zwei Größen für den HS33-60L und HS33-100L.



Perforiertes Tray, Edelstahl. Erhältlich in zwei Größen für den HS33-60L und HS33-100L (603/958×297×15 mm).



Perforiertes Tray mit Rollen, Edelstahl. Erhältlich in zwei Größen für den HS33-60L und HS33-100L (612/960×312×35 mm).\*



Perforiertes Tray, Aluminium. Erhältlich in zwei Größen für den HS33-60L und HS33-100L (583/958×293×15 mm).

## Optionales Beladesystem



Das perforierte Tray mit Rollen unterstützt die Beladung modularer Drahtkörbe. Für einen Drahtkorb (590×300×190 mm) oder 2–3 Körbe (590×300×100 mm) oder eine Kombination.




Satz von Regalen zum Beladen von Containern (STU) und Einzelpackungen direkt auf den Regalen.

\* Für optimale Ergonomie zusammen mit dem Transportwagen zu verwenden.

# Technische Daten

Innenmaße	HS33-60	HS33-100
Einzeltürmodell	Ja	Ja
Automatische Tür	Ja	-
Kammervolumen (l/CU ft)	63/2,2	100/3,5
Kammerbreite (mm/in)	320/12,6	320/12,6
Kammertiefe (mm/in)	620/24,4	971/38,2
Kammerhöhe (mm/in)	320/12,6	320/16,6
Kapazität STU* (Stk.)	1	1,5
* STU-Größe: 600×300×300 mm (L×B×H)		

Außenmaße	HS33-60	HS33-100
Sterilisatorbreite (mm/in)	595/23,4	595/23,4
Sterilisatorhöhe (mm/in)	817/32,2	817/32,2
Sterilisatorbreite (mm/in)	595/23,4	595/23,4
Sterilisatorhöhe (mm/in)	1.575/72,0	1.575/72,0

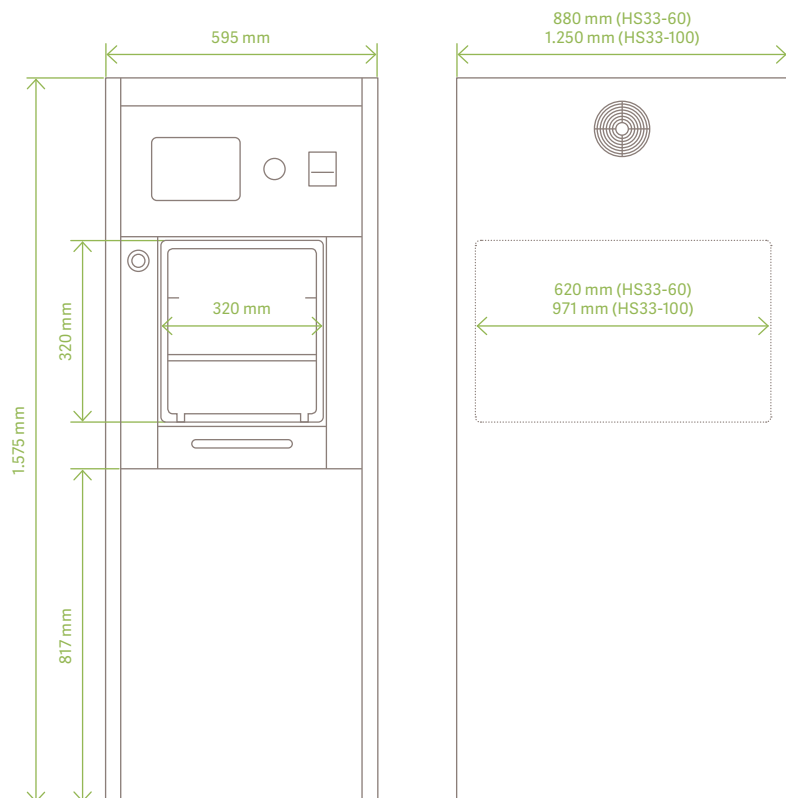



Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte, und bieten daher Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen, welche die klinischen Ergebnisse verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren sollen. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, Sterilgutaufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit und die Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

**Getinge IC Production Poland Sp. Z O O** · ul. Szkolna 30 · Plewiska, 62-064 · Poland · +48 61 630 99 01 · [info@getinge.com](mailto:info@getinge.com)

*Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:*

**Getinge Deutschland GmbH** · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · [info.vertrieb@getinge.com](mailto:info.vertrieb@getinge.com)

**Getinge Österreich GmbH** · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · [info-at@getinge.com](mailto:info-at@getinge.com)

**Getinge Schweiz AG** · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · [info@getinge.ch](mailto:info@getinge.ch)

[www.getinge.de](http://www.getinge.de)