

CSD DoseTech

Detergent Management System

CSD (Clean Sink Dosing system) Dose Tech は浸漬洗浄時の洗剤投入量を一定化し、一貫した洗浄効果を可能にします。浸漬槽や恒温槽への計量カップによる洗剤投入作業から解放されます。同時に、内部メモリーに洗剤投入量が日時と共に記録されるので安心です。



Getinge Clean エンザイマティックプラス
マルチ酵素中性洗剤




製品概要

- ・ 流量計により流量を計測 ➡ 正確な洗剤量を毎回自動投入
- ・ 工程記録USB (USBに日時、投入量、浸漬時間、温度を記録)
- ・ A、B 2種類の投入レベルを設定可能
- ・ A、B 2種類の浸漬時間を設定可能
- ・ 浸漬温度、浸漬時間を監視 ➡ 設定値を外れた場合はアラーム
- ・ リモコンにて、遠隔操作可能 (有線)
- ・ エラー発生時アラーム機能
- ・ 洗剤レベル低下アラーム (オプション)

オプション



洗剤レベル低下アラーム

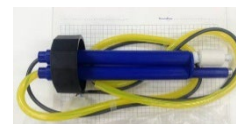

洗剤レベルセンサー



フットペダル

品番	製品名	寸法
6003001000	CSD DoseTech Flow meter (本体)	152 x 178 x 159 mm (L x W x D)
6003001012	フットペダル	
503662700	LEVEL SENSOR L=800MM (長さ調整可能)	

Getinge SteamCheck

次世代型 B&Dテスト機能搭載

Electronic detector of Non-Condensable Gases

非凝縮性ガスの電子検出器搭載

SteamCheck は Air Detectorにより、高圧蒸気滅菌器の滅菌サイクル中のチャンバ内残存空気量（非凝縮性ガス (NCG)）を検出します。NCG レベルが基準値内にある場合は、パネルに「PASS」と表示され、基準値外の場合は「Fail」となり、工程記録に記録されます。SteamCheck はスタートアップ機能と組み合わせることで、毎朝、自動的に滅菌器を起動し、暖気からSteamCheck（B&D Test）までを自動で行えます。



GSS67H シリーズ

毎朝のB&Dテスト作業が不要に！

Bowie-Dick TestPack

B&D Testプログラム

Electronic

Automatic test devices

SteamCheckプログラム



*SteamCheckはEN ISO 11140-4:2007
(ケミカルインジケーター) の該当部分に適合しています

詳しくは弊社担当営業へお問い合わせください。

販売名：GSS67H シリーズ
認証番号：229AKBZX00075000
販売名：GSS67H E シリーズ
認証番号：229AKBZX00074000

GETINGE *

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313 FAX：050-3000-1988
第1種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00176

本情報は、医療従事者またはその他の専門家を対象とした参考情報の提供のみを目的としています。本情報は網羅的ではないため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。最新の情報および注意事項については、医療機器添付文書を参照してください。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は自らの責任において行ってください。ここに述べられた治療法、ソリューション、製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの文書による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp