



# Getinge Clean Neutralizer

中和剂

# アルカリによる器材へのダメージ防止と、WDのスケール除去に

## 製品概要

Getinge Clean 中和剤は、ウォッシャーディスインプェクター（以下WD）のすすぎ工程、および／または、スケール除去（酸洗浄）工程にご使用いただけます。ISO 15883に準拠したGetingeのWDにおいて、洗浄試験・適合性を検証済みです。



一般医療用鋼製器材用



中和剤

## 特徴

- アルカリ洗浄後の器材表面を中和し、器材のコンディショニングをすると共に、排水のpHを効果的に下げます。
- 器材に優しい、有機酸ベースです。リン酸、界面活性剤は含みません。
- スケール除去プログラムを使用し、安全にWDの酸洗浄が行えます。硬水によるスケールや、その他の酸可溶性ミネラルの除去に効果的です。
- 無発泡仕様で、WDによる機械作用を妨げません。
- 防食性に優れており、ステンレスはもちろん、セラミック、ガラスおよび耐性プラスチックなど、耐酸性の材質にご使用いただけます。(\*1)(\*2)

(\*1) ポリカーボネートには使用できません。

(\*2) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

(\*3) pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

(\*4) 洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

## 基本情報

|      |                                 |       |
|------|---------------------------------|-------|
| 用途   | WDでのすすぎ水中和、スケール除去               |       |
| 液性   | 酸性（出荷時）                         |       |
| pH   | 1.2（出荷時の代表値）<br>2.2（実用液の代表値）    | ( *3) |
| 主成分  | クエン酸 他                          |       |
| 外観   | 無色～薄黄色・透明液体                     |       |
| 使用量  | 1～2 ml/L（中和工程）<br>1～5 ml/L（酸洗浄） | ( *4) |
| 使用温度 | 40℃～60℃（中和工程）<br>50℃以下（酸洗浄）     |       |

## Getinge Clean 中和剤

|        |               |
|--------|---------------|
| 内容量    | 5 L           |
| 品番     | 503435831     |
| JANコード | 4582130925218 |
| 使用有効期限 | 製造より24ヶ月      |

※仕様は予告なく変更することがあります。

# GETINGE



## ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲  
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)

© 2024 ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 | Getingeおよび GETINGE は、Getinge AB、その子会社または関連会社の商標または登録商標です。 | 2503.000.GGJ/IC-030-02 | All rights reserved.